



## MUESTRAS DEL TRACTO INTESTINAL Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES

### Muestra de Materia Fecal

Si se remiten heces frescas en un frasco de boca ancha estéril, refrigerar hasta la entrega al laboratorio. Cuando se trata de muestras de grandes animales puede extraerse del recto en bolsas plásticas.

Se debe recolectar de la materia fecal recién emitida preferentemente tocando zonas purulentas o sanguinolentas con hisopo estéril, luego, este se introduce en un tubo con medio de transporte Cary-Blair, en este caso la muestra puede ser válida hasta 5 días de recolectada.

Si la muestra se toma por hisopado rectal o cloacal, introducir el hisopo en el recto o cloaca del paciente y colocarlo en el medio de transporte. Al tomar este tipo de muestra se debe verificar que se manchó la punta del hisopo.

Para aislamiento de *Salmonella* spp. remitir como mínimo 25 g de materia fecal en frasco estéril y refrigerado. Se puede congelar si se remiten varios días posteriores a la toma de muestra, teniendo en cuenta que la cantidad de bacterias disminuye.